



QM-1-0250

**FONENDOSKOPY KAWE***Návod k použití*

- | | |
|---|--|
| 1) Použité symboly v návodu a na obale | 7) Doprava a skladování (okolní teplota, skladování) |
| 2) Účel a zamýšlené použití | 8) Údržba a servis |
| 3) Bezpečnostní pravidla/kontraindikace | 9) Příslušenství a náhradní díly |
| 4) Použití | 10) Likvidace |
| 5) Příprava k použití | 11) Příloha (záruka, kontakty) |
| 6) Hygienické instrukce (čištění a dezinfekce, sterilizace) | |

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste se rozhodl koupit si KAWE výrobek. Naše fonendoskopy jsou charakteristické vysokou kvalitou a trvanlivostí. Naše výrobky splňují požadavky Regulace (EU) 2017/745 (Evropská regulace ZP) a jsou klasifikovány jako zdravotnické prostředky třídy I.



Prosím, přečtěte si tento návod pozorně, striktně jej dodržujte a ponechte si ho pro případné budoucí informace. Před použitím pečlivě nastudujte pravidla použití, hlavně jak se o fonendoskop starat. Pokud máte nějaké otázky, kontaktujte servisní oddělení (viz adresa výrobce na obale).

1) Použité symboly v návodu a na obale

	Pozor!
	Řiďte se návodem
	Katalogové číslo
	Číslo šarže (LOT)
	Výrobní číslo
	Výrobce

	Označení CE
	Certifikace pro export do Ruska
	Neobsahuje latex
	Likvidace s běžným domovním odpadem
	Skladujte v suchu
	Zdravotnický prostředek

2) Účel a zamýšlené použití

Fonendoskop je diagnostický nástroj a skládá se z olivek vč. Lyry, zvukové hadičky a sluchátka. Je používán pro auskultaci zvuku a šelesti srdce, plic a dalších signálů k poslechu. V závislosti na vyšetření je fonendoskop aplikován mírným tlakem na určité místo na těle. U oboustranných fonendoskopů můžete vybrat jeden nebo druhý kanál (membrána). Zamýšlené použití je v souladu se všemi instrukcemi tohoto návodu, stejně tak, jako se základními pravidly a nařízeními. Výrobce neakceptuje odpovědnost za poškození vzniklé jiným použitím, než je zamýšleno. Cílová skupina pacientů: dospělí, děti a nemluvněta.

Výrobek může být používán jen autorizovanou, specializovanou osobou.

**3) Bezpečnostní pravidla/kontraindikace**

- Abyste zamezili poranění, nepoužívejte fonendoskop bez olivek. Pokud je guma olivky poškozená nebo chybí, musíte je vyměnit za nové olivky.
- Šroubovatelné olivky jsou pokryty gumou. Ověřte správnost dotažení olivky na lyru.
- Zamezte kontaktu vody s fonendoskopem.
- Silný zvuk může omezit citlivost vnímání slabších ozvů.
- Nesterilizujte v autoklávu.
- Nemějte v blízkosti tepla, rozpouštědel a olejů.
- Před použitím zkontrolujte, zda je fonendoskop v pořádku. Nepoužívejte, když je poškozený.
- Používejte pouze originální náhradní díly.

4) Použití

Základní princip auskultace fonendoskopu spočívá v „oscilujícím vzduchovém sloupci“. Pro přenos zvuku je potřebný uzavřený vzduchový sloupec. Když uchopíte lyru s olivkami, měly by být olivky mírně zahnuty na lyře směrem k obličejí zkoušejícího tak, že anatomický tvar ucha přispěje k uzavřenému akustickému prostoru. Položte sluchátko na místo k vyšetření. Následující modely mají oboustranné sluchátko (2 membrány): Planet air, Double, Rapport, Profi Kardio a Colorsop Duo. Kanál (membránu) vyberete pootočením naslouchátka o 180°. Sluchátka s membránou jsou používána buď k auskultaci anatomicky nerovných míst, nebo v případech kdy rozsahy nízké frekvence auskultačního signálu jsou malé nebo bezvýznamné pro diagnostiku.

5) Příprava k použití

- Zkontrolujte, zda fonendoskop není poškozen nebo kontaminován. Pokud je, nepoužívejte.
- Zkontrolujte, zda olivky dobře sedí.
- Nastavte lyru s olivkami dle bodu č.4

Po provedení výše uvedených kroků můžete fonendoskop použít k vyšetření.

6) Hygienické instrukce

Čistěte a dezinfikujte fonendoskop pravidelně, aby nedošlo ke kontaminaci.

Čištění a dezinfekce

Po vyšetření každého pacienta fonendoskop očistěte a vydezinfikujte např. hadříkem namočeným v 70% alkoholovém roztoku. Berte v úvahu časovou expozici (vyprchání) alkoholu.

Provádějte periodickou důkladnou očistu jednotlivých částí fonendoskopu. Používejte 70% alkohol. roztok nebo mýdlovou vodu. Při čištění můžete sejmut olivky, popř. sluchátko. Složte fonendoskop až po úplném vysušení komponentů. Automatické čištění není dovoleno.

Sterilizace

Fonendoskopy nejsou vhodné ke sterilizaci.

7) Doprava a skladování

Při dopravě a skladování zabraňte prachu, vlhkosti a kontaminaci.

Okolní teplota – vhodná je pokojová teplota. Nevystavujte extrémnímu horku nebo chladu.

Skladování – skladujte v separátním obale (např. plastický sáček). Zamezte silnému ohýbání hadičky v obalu.

8) Údržba a servis

Životnost fonendoskopu závisí na četnosti a způsobu použití. Poškozené části, které lze vyměnit, okamžitě vyměňte. Pro případnou opravu kontaktujte Vašeho dealera.

9) Příslušenství a náhradní díly

Příslušenství a náhradní díly můžete nalézt v hlavním katalogu společnosti KaWe
<https://www.kawemed.com/download/broschueren>.

10) Likvidace

Výrobek zlikvidujte dle příslušných místních pravidel do běžného domovního odpadu.



11) Příloha

Záruka

V případě správného používání v souladu s tímto návodem a použitím originálních náhradních dílů je zákonná záruční lhůta 2 roky od data prodeje. Pro ostatní dotazy kontaktujte Vašeho dealera nebo výrobce.

Základní UDI-DI 4030155KaWe06SU



Instrukce pro služební personál a pacienty

V případě problémů během použití je nezbytné okamžitě kontaktovat výrobce a kompetentní orgány daného státu EU, ve kterém je služební personál nebo pacient umístěn.

Veškeré informace jsou bez záruky a mohou se změnit.



KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG
Eberhardstraße 56
71679 Asperg, Germany

Phone: +49 7141 68188-0
Fax: +49 7141 68188-11
e-mail: info@kawemed.de

QM-1-0250 / B-43620 / 2021-07